

Angelcare®

A NYUGODT ÁLOMÉRT

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

LÉGZÉSFYGELEŐ KÉSZÜLÉK

AC300 TÍPUS




HU
57

PL
75



TARTALOMJEGYZÉK

 FIGYELMEZTETÉSEK	59
AC300 ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK	62
1. LÉPÉS - Az érzékelőlap elhelyezése	63
2. LÉPÉS - A babaegység beállítása	66
3. LÉPÉS - A monitor tesztelése és használata	67
Hibaelhárítás	69
Műszaki jellemzők	69
Korlátozott garancia	70
ANGLAIS	2
FRANÇAIS	15
ESPAÑOL	29
PORTUGUÊS	43
POLSKI	75

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET A TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁBÓL.

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS UTASÍTÁSOKAT A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT.

A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉSHEZ, HALÁLHOZ VAGY A TERMÉK KÁROSODÁSÁHOZ VEZETHET.

AZ ÉRZÉKELŐLAP NEM ALKALMAS FELNŐTTEKKEL VAGY 24 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB GYERMEKEKKEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA

AZ ÉRZÉKELŐLAP FUNKCIÓJA NEM AZ, HOGY MEGÁLLAPÍTSA, HOGY A GYERMEK A GYEREKÁGYON KÍVÜL TARTÓZKODIK-E

FIGYELMEZTETÉS

Felnőtteknek kell összeszerelnie.

A kisméretű alkatrészeket tartsa távol gyermekektől összeszerelés közben.

Az Angelcare®, minden termékéhez biztosít támogatást.

Ha nincs teljesen megelégedve, vagy kérdései vannak...

Egyesült Államok vagy Kanada: kérjük, forduljon hozzánk: angelcare@cddecinc.ca

Más országok: kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.





▲ FIGYELMEZTETÉS

1. A TERMÉK NEM HELYETTESÍTI A FELELŐSÉGTELJES FELNŐTT FELÜGYELETET. Ezt a terméket arra tervezték, hogy segítsen gyermekeire vigyázni. A babafelügyelő használata mellett továbbra is megfelelő felügyeletet kell biztosítani gyermeke biztonsága érdekében. Koraszülött vagy egészségügyi kockázatnak kitett gyermekek megfigyelését mindig egészségügyi szakember felügyelete mellett kell végezni. A monitort TILOS orvosi megfigyelőeszközként vagy a bölcsohalál (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS) megelőzésére szolgáló eszközként használni.

2. FULLADÁSVESZÉLY. A vezetékek a gyermekekre tekeredve FULLADÁST okozhatnak. SOHA ne próbálja az érzékelőlapo(ka)t a vezeték védőburkolata nélkül használni. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a vezeték védőburkolata biztonságos helyen, a gyerekkágy lába alatt legyen rögzítve. Ne használja az érzékelőlapo(ka)t, ha a védőburkolat megsérült vagy eltört.

3. MINDIG azonnal ellenőrizze gyermekét, amikor megszólal a riasztás.

4. NE használja a babafelügyelőt víz közelében (például fürdőkád, mosogató stb.).



5. Tartsa TÁVOL a babafelügyelőt hőforrásoktól (például tűzhelyek, radiátorok stb.).

6. MINDIG helyezze a babaegységet egyenes felületre függőleges helyzetben, és biztosítson körülötte megfelelő szellőzést. NE helyezze kanapákra, párnákra, ágyakra stb., amelyek gátolhatják a szellőzést.

7. Ez a termék NEM játék. NE hagyjon gyermekeket játszani a termékkel.

8. Ez a termék kisméretű alkatrészeket tartalmaz. Felnőtteknek kell összeszerelni. Legyen óvatos a termék kicsomagolása és összeszerelése során, és tartsa távol a kisméretű alkatrészeket gyermekektől.

9. A babafelügyelő használata során a szobahőmérsékletnek 10 °C és 40 °C között kell lennie.

▲ FIGYELMEZTETÉS AZ ELEMEKRŐL

10. NE keverje a használt és új elemeket. NE keverje az alkáli, hagyományos és újratölthető elemeket. Az elemeket megfelelő polaritással kell behelyezni. NE zárja rövidre az elem pólusait. KIZÁRÓLAG a javasolt elemeket, vagy azzal egyenértékű elemeket használjon (feszültség és méret). Távolítsa el az elemeket, amikor a terméket hosszú ideig nem használja, vagy ha az elemek lemerültek. A lemerült elemeket megfelelően kezelje.

H





11. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

11.1 Olvassa el ezeket az utasításokat – Minden biztonsági utasítást el kell olvasni a termék használatá előtt.

11.2 Őrizze meg ezeket az utasításokat. A biztonsági és használati utasításokat meg kell őrizni a későbbi tájékozódás céljából.

11.3 Tartson be minden utasítást – A termékben és a használati utasításban közölt minden figyelmeztetést be kell tartani.

11.4 Tartson be minden utasítást – Minden üzemeltetési és használati utasítást be kell tartani.

11.5 Víz és pára – NE használja ezt a készüléket víz közelében. Például fürdőkád, mosdókagyló, mosogató, mosókád közelében, vagy nedves környezetben, például úszómedencék mellett. Ügyeljen rá, hogy NE ejtse tárgyakat az egységekre, és ne öntsön folyadékokat az egységekre vagy az érzékelőlapra azok nyílásain keresztül.

11.6 Tisztítás – Minden egységet áramtalanítson tisztítás előtt. NE merítse vízbe a babaegységet semmilyen alkatrészét sem, csak száraz törölkendővel tisztítsa.

11.7 Szellőzés – NE zárja el egyik szellőzőnyílást sem. Biztosítsa a megfelelő szellőzést a készülék használata közben. NE fedje le a babaegységet tárgyakkal, például takaróval. NE helyezze fiókba vagy olyan helyre, ami tompíthatja a hangot, vagy akadályozhatja a levegő áramlását.

11.8 Hőforrások – NE helyezze hőforrások, például radiátorok, hősugárzók, tűzhelyek, TV-k vagy más hő termelő berendezések (például erősítők) közelébe. A hő károsíthatja a burkolatot vagy az elektromos alkatrészeket.

11.9 A vezetékek védelme – Vigyázzon, hogy az érzékelőlap vezetékére ne lépjenek rá és azt ne törjék meg bútor darabok vagy más tárgyak. A vezetékeket úgy kell vezetni, hogy azokra ne lépjenek rá, azokat ne nyomják tárgyak, különösen ügyelve a vezetékek csatlakozókhöz és konnektorhoz közeli és a termékből kilépő részére.

11.10 Tartozékok – Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket/ tartozékokat használjon. NE helyezze ezt a terméket instabil háromlábú vagy görgős bútorokra, állványokra, konzolokra vagy asztalokra. A termék leeshet, ami súlyos sérüléseket okozhat a gyermekeknek és a felnőtteknek, és súlyosan károsíthatja a terméket. KIZÁRÓLAG a gyártó által javasolt, vagy a termékkel szállított görgős vagy háromlábú bútort, állványt, konzolt vagy asztalt használjon. A termék felszerelését mindig a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.

11.11 Szerviz – NE próbálkozzon a termék önálló javításával, mivel a fedelek felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az elemfedeleket) veszélyes feszültségnek vagy más kockázatoknak teheti ki.

11.12 Cserealkatrészek – Amikor cserealkatrészekre van szükség, ügyeljen rá, hogy a gyártó által meghatározott, az eredeti alkatrészszel azonos cserealkatrészeket használjanak fel. Az engedélyezetlen csere tüzet, áramütést és más kockázatokot okozhat.


11.13 Felhasználás – Ezt a babafelügyelőt segítő eszköznek tervezték. Ez NEM helyettesíti a felelősségteljes felnőtt felügyeletet, és nem használható erre a célra. Ezt az eszközt KIZÁRÓLAG az ebben a kézikönyvben leírt eredeti célra szabad használni.

11.14 Tárgyak és folyadékok bekerülése – SOHA ne dugjon be semmilyen tárgyat a burkolat résein keresztül, mivel veszélyes feszültségű pontokkal érintkezhetnek, vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést okozhat. SOHA ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre.





11.15 FULLADÁSVESEZÉLY. A vezetékek a gyermekekre tekeredve FULLADÁST okozhatnak. SOHA ne próbálja az

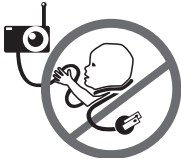

érzékelőlapo(ka)t a vezeték védőburkolata nélkül használni. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a vezeték védőburkolata biztonságos helyen, a gyerekágy lába alatt legyen rögzítve. Ne használja az érzékelőlapo(ka)t, ha a védőburkolat megsérült vagy eltört.

11.16 Rezgésforrások - A babafigyelő használata során NE használjon olyan gyerekágy tartozékokat, amik rezgéseket keltenek. Egyéb rezgésforrások lehetnek még a ventilátorok, mosógépek, hangos zene stb. Ezek a rezgésforrások zavarhatják az Angelcare® babafigyelő működését, és a riasztás nem szólal meg, ha a gyermekétől eltérő forrásból származó mozgást érzékel. A babafigyelő használata előtt ügyeljen arra, hogy minden rezgésforrást megszüntessen.

A téves riasztásoknak számos oka lehet. A leggyakoribb ok az, hogy nem kapcsolta ki a babaegységet, miután eltávolította a babát a gyerekágyból. Egy másik ok az, hogy nem megfelelően helyezik el az érzékelőlapot a matrac alatt.

Ügyeljen rá, hogy az érzékelőlap lapos, szilárd felületen helyezkedjen el, nyomtatott felületével felfelé. Az érzékenységi szint módosítására szintén szükség lehet. Lásd 3.1. lépés. Mindig azonnal ellenőrizze gyermekét, amikor megszólal a riasztás.

11.17 Érzékelőlap - Ha a gyerekágy alja rugós vagy lemezes kialakítású, helyezzen egy kemény farostlemezt a gyerekágy alja és az érzékelőlap közé 33 x 33 cm méretben 6 mm vastagsággal. Az Angelcare® babafigyelőt csak rögzített alvási környezetben, például gyerekágyban használja, ahol az érzékelőlap teljesen vízszintes, szilárd felületen helyezhető el.

12. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEMEL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

12.1 KIZÁRÓLAG a felhasználói kézikönyvben meghatározott típusú és méretű elemeket használjon. A nem megfelelő típusú elemek használata esetén azok felrobbanhatnak.

12.2 NE használjon újratölthető elemeket a babaegységben. **KIZÁRÓLAG** alkáli elemet használjon.

12.3 NE dobja a használt elemeket tűzbe. Ezek felrobbanhatnak. Ellenőrizze az elemek helyi hulladékkezelési szabályait.

12.4 Legyen óvatos az elemek kezelése során, hogy ne zárja rövidre azok pólusait olyan vezető anyagokkal, mint a gyűrűk, karperecek és kulcsok. Az elemek túltöltése, rövidre zárása, fordított feltöltése, károsítása vagy meggyújtása tilos, mert az az alábbiakat okozhatja: mérgező anyagok kijutása, hidrogén- és/vagy oxigéngáz kijutása, a felületi hőmérséklet emelkedése.

12.5 NE próbálkozzon a mellékelt, vagy később vásárolt elemek felfrissítésével azok melegítésével. Az elem elektrolit tartalma hirtelen szétfröcskölhet, égéseket, valamint szem- és bőrirritációt okozva.

12.6 Ha szükséges, az elemeket azonos vagy egyenértékű típusra kell cserélni (feszültség és méret). Ha a cserélendő elem más elemekkel sorba van kapcsolva, a többi elemet is cserélje ki egyidejűleg. NE keverje a használt és új elemeket.

12.7 Kerülje el az elemek fordított polaritással történő behelyezését a termékbe. Az elemek fordított behelyezése azok töltéséhez vezethet, ami szívárgást vagy robbanást okozhat.

12.8 Távolítsa el az elemeket a termékből, ha a terméket 30 napnál hosszabb időre tárolja, mivel az elemek szívároghatnak és károsíthatják a terméket.

12.9 A lemerült elemeket a lehető leghamarabb vegye ki, mivel a lemerült elemek jó eséllyel szívároghatnak és károsíthatják a terméket. Ha az elem szívárog vagy ereszt, azt azonnal távolítsa el gumikesztyűben.

12.10 NE tárolja ezt a terméket, vagy a mellékelt vagy később vásárolt elemeket magas hőmérsékleten.

H







ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK

LÉGÉSZFIGYELŐ KÉSZÜLÉK
AC300 TÍPUS

A CSOMAGBAN:

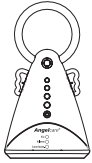

Babaegység

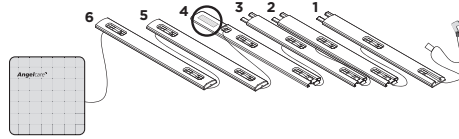

1 érzékelőlap (AC300) vagy 2 érzékelőlap (AC300-2SP)
előre felszerelt vezetékburkolatokkal

KÉSZÍTSE ELŐ AZ ALÁBBIKAT:

Egy kemény farostlemez (nincs mellékelve)

Vastagság: **6 mm**

Minimum méretek:

33 cm x 33 cm

Maximum méretek:

a matrac méretével azonos méret



Farostlemez

FONTOS

A farostlemeznek nagyobbak kell lennie az érzékelőlap felületénél, vagy az AC300-2SP esetében a két érzékelőlapnál.

MIRE LESZ SZÜKSÉGE (NINCS MELLÉKELVE)



2 AA alkáli elem




Mini keresztfejű csavarhúzó

A GYEREKSZOBÁBAN:

FONTOS

Helyezze a gyerekágyat egy támaszfal mellé, huzattól védett helyen. Helyezze a babaegységet egyenletes, stabil felületre, a gyerekágy felé fordítva, legalább **1 méter** távolságban. Győződjön meg arról, hogy az adaptert a készülékhez legközelebbi fali aljzatba csatlakoztatta, ahol az könnyen hozzáférhető.

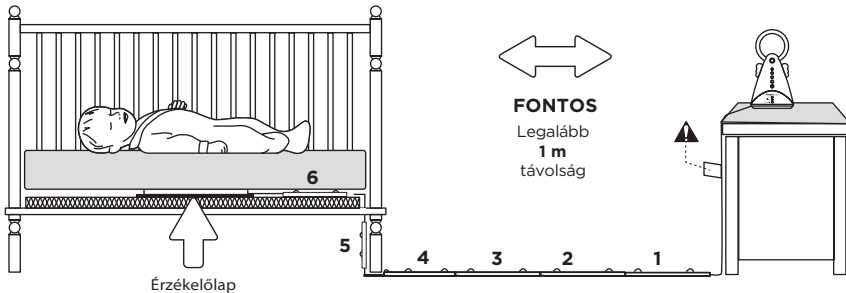


Érzékelőlap





1. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKELŐLAP ELHELYEZÉSE

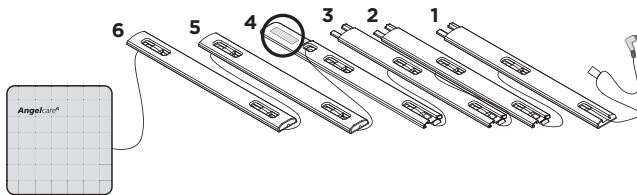

Érzékelőlap előre felszerelt vezetékburkolatokkal

Vezetékburkolatok 1, 2, 3, 4: Helyezze a padlóra

Vezetékburkolat 4: Kétoldalú ragasztószalaggal a gyermekágy lába alatti biztonságos rögzítéshez

Vezetékburkolat 5: Helyezze el függőlegesen az ágyrác és a padló között

Vezetékburkolat 6: Helyezze a matrac alá

⚠ FIGYELMEZTETÉS

FULLADÁSI KOCKÁZAT.

A gyermekek a vezetékektől MEGFULLADHATNAK.


- A komoly fulladási kockázat miatt csecsemők és kisgyermekek számára, a szülők és gondozók számára tilos a babaegységet a gyermekágyhoz 1 m-nél közelebb helyezni.
- **SOHA** ne használja az érzékelőlapot a vezetékburkolatok nélkül. Ellenőrizze a vezetékburkolatokat minden használat előtt, és ellenőrizze, hogy azok biztonságosan a gyermekágy lába alatt helyezkednek el. Ne használja az érzékelőlapot, ha a vezetékburkolatok megsérültek vagy eltörték.



CH

1.1 - VÁLASSZON HELYET A BABAEGYSÉGNEK

Válasszon egy helyet a babaegységnek, amely legalább **1 méter távolságban van a gyermekágytól.**

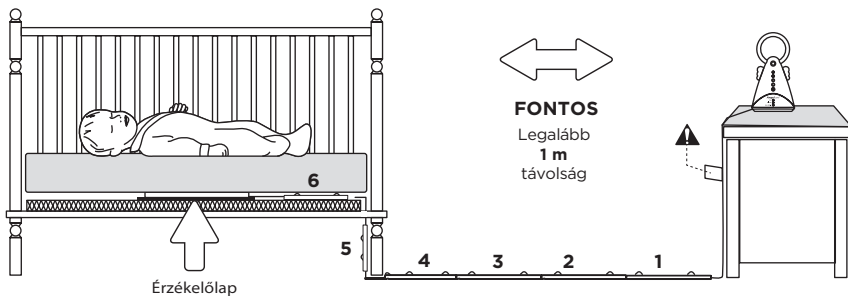

FONTOS


Legalább
1 m
távolság






1.2 - VÁLASSZA KI A GYEREKÁGYNAK AZT A LÁBÁT, AMIHEZ A VEZETÉKBURKOLATOKAT RÖGZÍTI

JAVASOLT

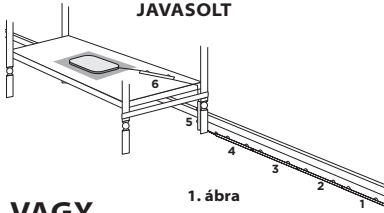

1. ábra

VAGY

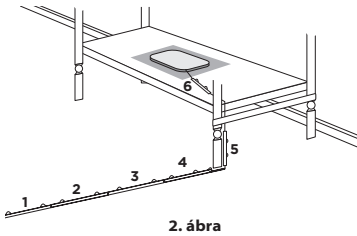


2. ábra

Használja a gyerekágynak a babaegységhez legközelebbi fal melletti lábát (**1. ábra**). Abban az esetben, ha a babaegység a szoba túlfoldalán helyezkedik el, használja a babaegységhez legközelebbi lábát a vezetékburkolat elhelyezéséhez (**2. ábra**). Lehetőség szerint a burkolt vezetékét mindig a fal mentén vezesse.

1.3 - HELYEZZE AZ ÉRZÉKELŐLAPOT AZ ÁGYRÁCSRA

2)

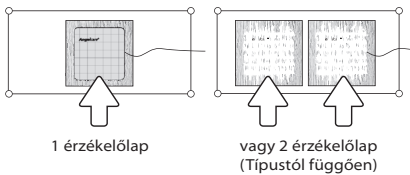


1 érzékelőlap


vagy 2 érzékelőlap
(Típustól függően)

- 1) Távolítsa el a matracot a gyerekágyból.
- 2) Helyezze az érzékelőlapot - nyomtatott felületével felfelé - a **kemény farostlemez** tetejére a gyerekágy közepén.
- 3) Vezesse végig a csatlakozót, figyelmeztető címkét és az első 5 vezetékburkolatot a gyerekágy lábának hátsó oldalán, **az ágyrács és a gyerekágy belső széle között**.
- 4) Vezesse végig az első 4 vezetékburkolatot a padlón, és tartsa az 5. vezetékburkolatot a gyerekágy lába mentén függőlegesen **(a matrac és a gyerekágy belső széle között)**.
- 5) Húzza feszesre a vezetékét, hogy annak egy szakasza se legyen laza.


3)




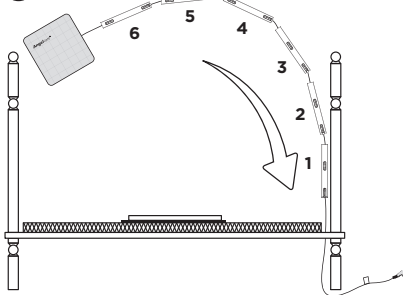


4)

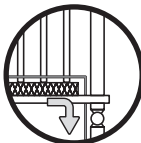

5)

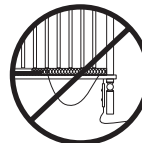

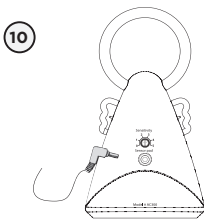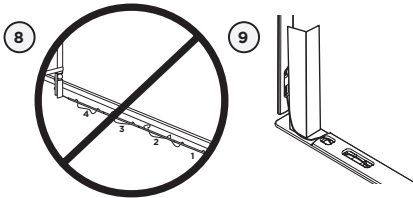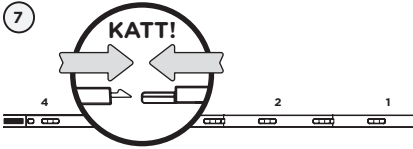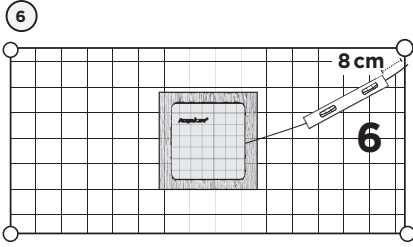

CH

- 6) Helyezze a 6. vezetékburkolatot körülbelül 8 cm távolságba az ágyrács szélétől.
- 7) Pattintsa össze a többi vezetékburkolatot, amik a padlón haladnak.
- 8) Húzza feszesre a vezetéket, hogy annak egy szakasza se legyen laza.
- 9) Húzza le a kétoldalú szalagot a 4. vezetékburkolaton és helyezze biztonságosan a gyerekágy lába alá.
- 10) Helyezze a babaegységet egyenesen, stabil felületre, a gyerekágy felé fordítva, legalább 1 méter távolságban és csatlakoztassa az érzékelőlapot a babaegységhez.
- 11) Ellenőrizze, hogy az érzékelőlap nem mozdult-e el a helyéről.
- 12) Helyezze vissza a matracot a gyerekágyba.

• Az érzékelőlap minden méretű és típusú matracal működik, kivéve a memóriaszivacs matracokat és üres keretes matracokat.

• A farostlemez folyamatos nyomást fejt ki az érzékelőlapra, lehetővé téve, hogy az érzékelje a baba mozgását még akkor is, ha a baba a gyerekágy szélénél helyezkedik el.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

FULLADÁSI KOCKÁZAT


- Húzza feszesre az érzékelőlap vezetékét.
- Az ágyrács leeresztése során, amint gyermeke növekszik, csúsztassa a függőleges vezetékburkolatot (5) felfelé, hogy az körülbelül közepén maradjon az ágyrács és a padló között. Csúsztassa át az érzékelőlap vezetékét a padlón lévő burkolatszakaszra, hogy az feszes legyen

- Az érzékelőlap nem alkalmas felnőttekkel vagy 24 hónaposnál idősebb gyermekekkel történő használatra.
- Ne használja tovább az érzékelőlapot, amikor gyermeke eléri a 24 hónapos kort. Távolítsa el az érzékelőlapot a gyerekágyból és tárolja további használatra.
- AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT: Ahhoz, hogy ellenőrizze, hogy a készülék készen áll-e a használatra, olvassa el a használati utasításnak a készülék tesztelésére vonatkozó részét






2. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

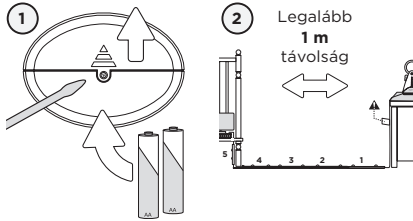

- 1) Távolítsa el az elem fedelét és helyezzen be 2 AA alkáli elemet (nincs mellékelve).
- 2) Helyezze el a babaegységet legalább 1 m távolságban a gyerekágytól.

BABAEGYSÉG:

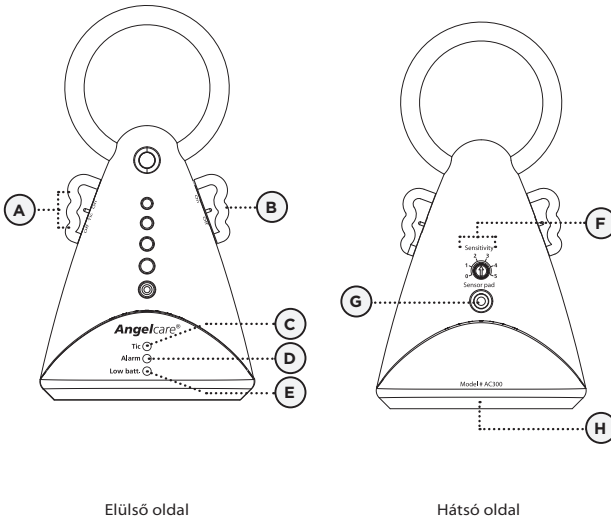

A) Mozgásérzékelő „KATTOGÁS” BE/KI gomb

B) BE/KI kapcsoló



C) Mozgásérzékelő „KATTOGÁS” jelzés (villog)

D) Riasztás jelzés

E) Elem merül jelzés

F) Mozgás érzékenység beállító tekerő gomb

G) Érzékelőlap csatlakozó

H) Elem fedél (az ábrán nem látható)






3. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE ÉS HASZNÁLATA

Testelje a babafigyelőt, ha az érzékelőlapot új helyre helyezi, hogy biztosítsa az új ágybetétnek vagy matracnak megfelelő érzékenységet.

3.1 - ÉRZÉKELŐLAP

AZ ÉRZÉKELŐLAP TESZTELÉSE:

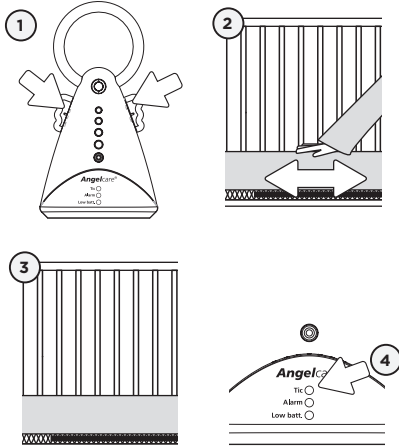

- 1) Kapcsolja be a BE/ON és a „KATTOGÁS/Tic” kapcsolót.
- 2) Könnyedén mozgassa kezét a matracon.
- 3) Vegye el a kezét a matracról. 15 másodperc után előjelző „KATTANÁST” hall.
- 4) 5 másodperccel később megszólal a riasztás, és a piros fényjelzés (Riasztás jelzés) folyamatosan villog.

CH


MOZGÁS RIASZTÓ

- Ha a készülék NEM észlel mozgást, 15 másodperc után a babaegység egyetlen előjelző „KATTANÁST” ad ki.
- Ha további 5 másodperc után továbbra SEM észlel mozgást, a babaegység hangos riasztást ad ki.

HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG


- Ne érjen a gyerekágyhoz az érzékelőlap működése közben.
- Helyezze a gyerekágyat egy támaszfal mellé.
- Módosítsa az érzékelőlap érzékenységi szintjét.

A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSÁHOZ

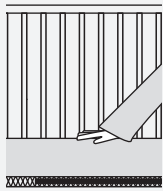

Helyezze vissza kezét a matracra.

VAGY

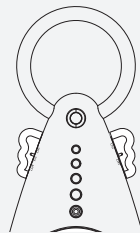

Kapcsolja KI a babaegységet





AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ:

Forgassa el a babaegység érzékenység tekerő gombját a kevésbé érzékeny (0) és a nagyon érzékeny (5) között.

Az optimális eredmények érdekében kezdje a 3-as érzékenységi szinttel, szükség szerint fél szintenként növelve vagy csökkentve az érzékenységet.

FONTOS

- Az érzékelőlap nem alkalmas felnőttekkel vagy 24 hónaposnál idősebb gyermekekkel történő használatra.
- Miután befejezte az érzékelőlap használatát, vegye ki azt a gyerektárolóból és tárolja azt.



Érzékenység



Érzékelőlap




MEGJEGYZÉS:

Ha téves riasztásokat tapasztal, módosítsa az érzékenységi szintet.

3.2 - ELEMEK

Az Angelcare® légzésfigyelő készülék elemekről működik.

- Az elemek élettartama körülbelül 3 - 4 hónap.

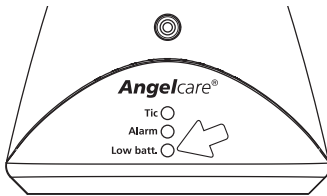


ELEM RIASZTÁS

- Amikor a babaegység gyors kattogó hangot hallat, sürgősen cserélje ki az elemeket.

MOSTANTÓL KÉSZEN ÁLL A BABAFIYELŐ HASZNÁLATÁRA

3.3 - A KATTOGÁS FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

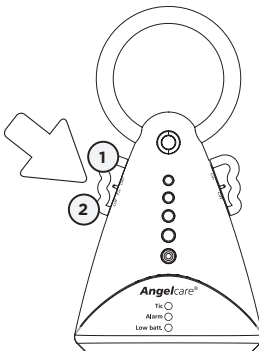

- 1) **Csúsztassa a kapcsolót BE/ON** állásba a „KATTOGÁS” funkció aktiválásához. Emellett zöld fényjelzés is jelzi a mozgást.
- 2) **Csúsztassa a kapcsolót KI/OFF** állásba a „KATTOGÁS” funkció kikapcsolásához. A zöld fényjelzés továbbra is villog, jelezve hogy a légzésfigyelő funkció továbbra is működik.

MEGJEGYZÉS:

Ha a zöld fényjelzés nem jelenik meg, de helyette egy piros fényjelzés villog; vagy ha téves riasztásokat tapasztal, módosítsa az érzékenységi szintet (3. lépés).





HIBAELHÁRÍTÁS

TÉVES RIASZTÁSOK

- Kapcsolja KI a babaegységet.
- Ellenőrizze a csatlakozást az érzékelőlap és a babaegység között. Húzza ki és csatlakoztassa újra a vezetékét.
- Ellenőrizze, hogy nem került-e ágynemű a matrac és az érzékelőlap közé.
- Ha a gyerekágy alja rugós vagy lemezes kialakítású, helyezzen egy kemény farostlemezt a gyerekágy alja és az érzékelőlap közé 33 x 33 cm méretben 6 mm vastagsággal.
- Ellenőrizze, hogy az érzékelőlap az üzembehelyezési előkészületekben leírt módon van-e elhelyezve. Az érzékenység módosítható, lásd 3.1 lépés.

A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

- Ne érjen a gyerekágyhoz, ha a babafigyelő BE van kapcsolva.
- Helyezze a gyerekágyat egy tömör támaszfal mellé, hogy az ne érzékelje a gyerekágyon kívüli mozgásokat.
- Kapcsolja KI a gyerekágy mozgatórendszereket, ventilátorokat, hangos zenét és bármi mást, ami rezgést okozhat.
- Lehetséges, hogy csökkentenie kell az érzékenységet, lásd 3.1 lépés.

UJ

A RIASZTÁS JELZŐFÉNY PIROSAN VILLOG (A BABAFIGYELŐ ALIG ÉSZLEL MOZGÁST)

- Ellenőrizze, hogy nem került-e ágynemű a matrac és az érzékelőlap közé.
- Az érzékelőlapnak teljesen lapos, szilárd felületen kell elhelyezkednie. Ha a gyerekágy alja rugós vagy lemezes kialakítású, helyezzen egy kemény farostlemezt a gyerekágy alja és az érzékelőlap közé 33 x 33 cm méretben 6 mm vastagsággal.
- Ellenőrizze, hogy az érzékelőlap a az üzembehelyezési előkészületekben leírt módon van-e elhelyezve. Az érzékenység módosítható, lásd 3.1 lépés.

A KÉSZÜLÉK NEM KAPCSOL BE

- Ellenőrizze vagy cserélje ki az elemeket.
- Ellenőrizze, hogy BE van-e kapcsolva a babafigyelő.

Ha az ebben a kézikönyven nem jelzett problémát tapasztal, kérjük, ne vigye vissza a terméket az üzletbe. Ha nincs teljesen megelégedve, vagy kérdései vannak:

Egyesült Államok vagy Kanada: kérjük, forduljon hozzánk: angelcare@cdecinc.ca

Más országok: kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Lehet, hogy rendelkezünk egyszerű megoldással a problémára.





MŰSZAKI JELLEMZŐK

Energiaellátás:

2 AA alkáli elem (nincs mellékelve)

Figyelem: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.

Elemek:

- NE keverje a használt és új elemeket.
- NE keverje az alkáli, hagyományos (szén-cink) és újratölthető elemeket.

Az Angelscare Monitors Inc. ezennel kijelenti, hogy a babaőrző megfelel a szükséges szabályzásoknak és az 2004/108/ EC irányelv vonatkozó előírásainak.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a helyi forgalmazótól igényelheti. Hivatkozson a kézikönyvben található címre.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Angelcare® garantálja e termék első tulajdonosának, hogy az Angelcare®, légzésfigyelő (AC300 típus) anyag- és gyártási hibáktól mentes, az eredeti vétel dátumától számított egy (1) évig. Ha ez a készülék nem működik megfelelően az utasításoknak megfelelő használat esetén normális körülmények között az egy éves időszak alatt, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. Kérjük, forduljon forgalmazójához.

A termékhez mellékelni kell a vételt bizonyító nyugtát vagy más bizonyítékot arra, hogy a készülék a garanciális időszakon belül van. Az Angelcare® állja a termék javításának vagy cseréjének, illetve a termék Önhöz történő visszaszállításának költségét.

Ez a garancia nem érvényes abban az esetben, ha a termék nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő energiaellátás vagy egyéb hibás használat miatt hibásodott meg. A garancia akkor is érvénytelen, ha a termék tulajdonosa azt bármilyen módon javítja vagy módosítja. Az Angelcare® nem vállal felelősséget semmilyen baleseti vagy következményes kárért e termékkel kapcsolatban. A garancia a fent vállaltakon kívül minden egyéb felelősséget kizár. Más garanciát nem adunk.

A jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre és kiegészítőkre, amelyeket nem az Angelcare gyárt, illetve azokra a problémákra, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából, a termék utasításainak be nem tartásából, illetve az Angelcare által nem támogatott alkatrészek és komponensek használatából erednek.

A TÖRVÉNYES JOGOK ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐEK LEHETNEK. EGYES ORSZÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A BALESETI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

SEMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIEÉRT.

FONTOS!

Az Angelcare® babafigyelő személyes jellegű termék. Kérjük, ne vigye vissza ezt a terméket a boltba. Ha kérdései vannak vagy segítségre szorul, kérjük, a termék visszaküldése előtt hívja a forgalmazót.



ÓVJA A KÖRNYEZETET

Ez az elektronikus készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, és azt nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, vigye a készüléket egy elektromos és elektronikus készülék gyűjtőpontra (a részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál).





TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire a világon mindenütt 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakíttatta.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken. (Tel.: 06/20/2557750, info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: Isd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

H
U

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt előállnak nincs helye.

12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződés megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.

13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.





14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármintemű beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC300 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA: ANGELCARE® AC300 típusú készülék	A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJÁ:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységet.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e,
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.





Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.

Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszmeletlen	Kicsit döntsek hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként. Ne alkalmazzon szívmasszázst! Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...nem lélegzik	
...van pulzusa	
...eszmeletlen	Kicsit döntsek hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést. Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.
...nem lélegzik	
...nincs pulzusa	

H
U

MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.



2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



3. Három levegő befúvás

Amennyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilégzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)





Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)



SZÍVMASSZÁZS

1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmasszázst végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázst matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabaddá kell tenni.

2. Nyomási pont

Képzelen el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső ujjá így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak



3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérrrel, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas-keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázst, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)





www.angelcarebaby.com

